

ティルト角度の調整の仕方



- ① 前方のネジ穴③と後方のネジ穴④で固定している時、シートは水平です。
- ② 前方のノブボルトを左右とも外し②へ固定した場合、前方が5°上がります。
※この時、後方は④のままです。
- ③ 前方のノブボルトを①へ固定した場合、前方が10°上がります。
※この時、後方は④のままです。
- ④ 前方のノブボルトを①へ固定したまま後方のノブボルトを⑤へ固定した場合
後方が5°下がります。（水平を起点にすると15°角度がつきます）
- ⑤ 前方のノブボルトを①へ固定したまま後方のノブボルトを⑥へ固定した場合
後方が10°下がります。（水平を起点にすると20°角度がつきます）

上記5通りの角度調整が可能です。