

PBS マットのお取扱いについて

この度は「PBS マット」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用に関しては、下記の点にご注意頂きますよう宜しくお願いします。

- 1 マットの裏面のビーズ充てん口がマジックテープで塞いであります。
ビーズの充てん（交換・増量・減量）が可能な構造になっていますが、
別の目的で充てん口を開くと、ビーズの漏れにつながりますので
ご注意ください。
- 2 万が一ビーズが漏れてしまったら、小さいお子様の口に入らないよう
十分注意して頂き、ビーズ充てん口から再度入れてください。
- 3 あらかじめ汚れやすい使用環境が想定される場合は、マット上に大判
タオルなどを敷いてお使いください。
- 4 洗うことが可能になっております。汚れた部分をぬるま湯で手洗いして
いただき、よく水分をしぼって陰干ししてください。
洗濯器・乾燥機のご使用は避けてください。
乾燥機のご使用は避けてください。
合成洗剤のご使用もできるだけ避けてください。ビーズの油脂成分が抜
けて、弾力性が落ちる場合があります。
- 5 エクステンション・キットについて、ご使用になる際は、裏面マジック
テープで本体とエクステンションを均一に接合しお使いください。
- 6 体圧分散について、マットの使用場所・体重・体格によって効果は
さまざまです。床ずれ等の治療・予防などには専門の医師にご相談
ください。

製造・販売 (株)片山車椅子製作所
名古屋市西区中小田井5-179
052-501-7661