

PBS(パイプ・ビーズ・シーティング)マット 取り扱いについて

この度は「PBSマット」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用に関しては、下記の点にご注意頂きますよう宜しくお願いします。

1. マット裏面のビーズ充てん口がマジックテープで塞いであります。
ビーズの充てん(交換・増量・減量)が可能な構造になってはいますが、
別の目的で充てん口を開くと、ビーズの漏れにつながりますので
ご注意ください。
2. 万が一ビーズが漏れてしまったら、小さいお子様の口に入らないよう
十分注意して頂き、ビーズ充てん口から再度入れてください。
3. 表面素材は微起毛素材を使用し、一年を通して使えるように考えま
した。特に汗をかきやすい夏場は、マットの上に大判タオルなどを
敷いてお使いいただくとさらに効果的です。
4. 洗うことが可能になっております。手洗いで、洗濯機の脱水をかけ、
陰干ししてください。この際もビーズの漏れには十分ご注意ください。
尚、乾燥機のご使用は避けてください。
5. エクステンション・キットについて、ご使用になる際は、裏面にマジッ
クテープで本体とエクステンションを均等に接合しお使いください。
6. 体圧分散について、マットの使用場所・体重・体格によって効果は
さまざまです。床ずれ等の治療・予防などには専門の医師にご相談
ください。

製造・販売 (株)片山車椅子製作所
名古屋市西区中小田井5-179
052-501-7661